

## **BRUKSANVISNING**

Paraffinberedare 300W



## Tekniska data

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| <b>Nominell spänning</b>    | <b>220V/240V</b>             |
| <b>Elektrisk effekt</b>     | <b>300W</b>                  |
| <b>Nominell frekvens</b>    | <b>50/60HZ</b>               |
| <b>Temperaturområde</b>     | <b>maximalt 70°</b>          |
| <b>Mått och dimensioner</b> | <b>31 x 24 x 16 cm</b>       |
| <b>Kammarens kapacitet</b>  | <b>1,8 LITER - 2,5 LITER</b> |

## Bruksanvisning:

1. Anslut apparaten till strömförsörjningen.
2. Lägg i paraffinet i apparaten (i skålen/hållrummet i mitten av apparaten).
3. Ställ in temperaturen på HI (70°C) genom att vrida på ratten och vänta tills paraffinet har lösts upp.
4. Sänk sedan temperaturen till LO (55°C). Placera grillplattan på apparatens undersida (detta för att undvika eventuell brännskada).
5. Innan paraffinbehandlingen på händerna kan du göra en skrubb för en bättre effekt och sedan applicera ett lager kräm.
6. Sedan kan du doppa händerna eller fötterna direkt i paraffinvaxet genom att sätta dem i paraffinvaxmaskinen.
7. Sätt händerna i foliehandskar och sedan i frottéhandskar och håll dem så här i cirka 20 minuter.
8. Om behandlingen görs på fötterna, linda först in fötterna i folie och sätt sedan på strumpor och håll också i 20 minuter.
9. Efter denna tid tar du bort handskarna/sockorna och engångspåsarna tillsammans med paraffinet.
10. När du är klar smörjer du in dig med fuktkräm och vrider sedan ratten till OFF och kopplar ur apparaten.

## Tips:

1. Kontrollera paraffinets temperatur på din handled före användning.
2. Använd inte på skadad hud.
3. Använd inte på hud med akne.
4. Håll inte ut det smälta paraffinet. Låt det svalna först, slå sedan på apparaten i ca 1 minut och ta bort det nedersta lagret av paraffin när det har smält.
5. Vänta minst en minut innan du slår på apparaten igen.
6. Du måste använda den spänning som anges på apparaten.

## Var uppmärksam!

- Upphettat paraffin är varmt. Hantera det försiktigt för att undvika brännskador.
- Använd paraffin utan förpackning.

## Rengöring av apparaten:

1. Använd inte lösningsmedel eller starka rengöringsmedel.
2. Koppla alltid bort apparaten från strömförsörjningen före rengöring.
3. Blötlägg inte apparaten i vatten.
4. Använd inte vassa föremål för rengöring.
5. Du kan använda en speciell vätska för att ta bort vax- och paraffinrester.

## Var uppmärksam på

- Apparaten bör rengöras regelbundet för att förhindra ansamling av smuts, damm och andra oönskade ämnen. Ansamling av ovanstående kan leda till funktionsfel på apparaten eller till och med skada på utrustningen.
- Det är inte tillåtet att linda nätsladden runt apparaten, eftersom det kan leda till att sladden inte fungerar som den ska.
- Se alltid till att apparaten får ström från en källa med rätt spänning. Se till att stickkontakten är ordentligt isatt i uttaget. I annat fall kan det leda till brand, elektriska stötar eller brännskador.
- Ändra inte, sträck inte, böj inte för mycket eller vrid inte sladden.
- Inget tungt får placeras på sladden.
- Förhindra att damm eller andra skadliga ämnen tränger in i kontakten.
- Apparaten får inte stötas till eller kastas. Om apparaten skadas till följd av en stöt eller ett fall får du inte fortsätta att använda den.

## SÄKERHETSÅTGÄRDER

1. Apparaten får inte demonteras eller användas för andra ändamål än de som anges i denna bruksanvisning. All service och alla reparationer får endast utföras av en auktoriserad servicetekniker (företaget ACTIVESHOP Ltd.).
2. Installera eller använd inte apparaten i närheten av vätskor, på våta ställen eller med våta händer - se till att inga vätskor kan tränga in i apparaten.
3. Dra omedelbart ut stickkontakten ur vägguttaget och kontakta ett auktoriserat servicecenter som tillhandahålls av ACTIVESHOP Sp. z o.o. i följande fall
  - a) (a) vätska har trängt in i apparaten, (b) apparaten avger en konstig lukt, rök eller konstiga ljud, (c) nätsladden har skadats, (d) apparaten har välts omkull eller dess hölje har skadats.
4. Placera inte några föremål på kablarna. Installera inte apparaten i områden där någon kan trampa på nätsladden.
5. Av säkerhetsskäl bör du dra ut nätsladden ur vägguttaget varje gång du avslutar arbetet med apparaten.
6. För inte in något i apparatens öppning. Om ett främmande föremål kommer in i öppningen ska du dra ut sladden ur vägguttaget och kontakta återförsäljaren eller tillverkaren.
7. Placera inte apparaten på en instabil vagn, hylla eller fordon. Enheten kan skadas om den tappas.
8. För att garantera apparatens livslängd rekommenderar vi att du håller ett intervall på på en minut innan du trycker på strömbrytaren igen (mellan på- och avstängning och vice versa).
9. Strömförsörjningen måste överensstämja med specifikationerna på märkskylten. I annat fall annars finns det risk för att apparaten inte fungerar som den ska, att den skadas eller till och med brinner upp.

## UPPMÄRKSAMHET

1. Vid skada på nätkabeln eller andra fel, kontakta ett auktoriserat servicecenter för att undvika fara.
2. Denna apparat får användas av barn som är minst 8 år gamla och av personer med nedsatt fysisk och mental förmåga och som saknar erfarenhet av och förtrogenhet med utrustningen, om de övervakas eller får instruktioner om hur utrustningen ska användas på ett säkert sätt så att de förstår de risker som är förknippade med den.
3. Utrustningen är inte avsedd att lekas med av barn. Låt inte barn leka med apparaten.

4. Lämna inte apparaten obehärdad när barn eller personer som inte har tillräcklig kunskap om hur apparaten ska användas befinner sig i närheten.
5. Denna elektriska enhet är inte en leksak. Felaktig användning av eller kontakt med elektriska apparaten kan utgöra en hälsorisk eller leda till döden, så förvara den utom räckhåll för barn.

#### KASSERING AV APPARATEN



Lämna in förbrukade elektriska apparater, tillbehör och förpackningar till återvinningscentraler i enlighet med miljöskyddsprinciperna. Elektriska apparater får inte slängas i hushållssoporna. Följ de regler som gäller för avfallshantering av denna typ av utrustning. För att skydda miljön i enlighet med direktivet

2012/19/EG om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter ska avfall som utgörs av eller innehåller elektriska produkter samlas in separat och lämnas till samlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter. Uttjänta och gamla apparater som innehåller helt återvinningsbara komponenter bör därför skickas till återvinning. Därför bör de lämnas till lämpliga samlingsplatser och till ACTIVESHOP Ltd.

#### LAGRING OCH TRANSPORT

Enheten ska transporteras i en temperatur mellan (-) 20 °C och (+) 50 °C endast i sin originalförpackning. Enheten ska förvaras i ett väl ventilerat utrymme med en relativ luftfuktighet på högst 75%. Driftstemperatur mellan (+) 10 °C och (+) 40 °C. Under förvaring och transport får enheten inte kastas eller tappas, utsättas för mekaniska stötar eller atmosfäriska ämnen.



